

SL クリーナー

(自然開口向け内視鏡用くもり止め)

使いやすい液体防曇剤 **SL CLEANER** FOR OPTICAL LENS

【特 性】

優れた界面活性剤の力により防曇効果が抜群です。
 レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
 毒性がありません。LD₅₀:5000mg/Kg(マウス経口投与)
 液体ですから薄く均一に塗れます。
 使いやすい滴ビン入りです。



【使用法】

クリーナーをレンズ面に1滴落とし、乾燥した清浄なガーゼで拭き取って下さい。それだけで極く薄い膜を均一に塗ることが出来ます。

【成 分】

界面活性剤
 n-Alkylbenzenesulfonate
 Poly(oxyethylene) alkyl ether
 Ethyl alcohol

(直射日光・高温・多湿を避けて保管して下さい。
 未開封時2年安定)



【梱包形態】 ※

1カートン(大箱) : 滴ビン1本(10ml入り、チャック付ポリ袋・小箱包装)
 が10本入っています。

※ : 梱包材質・滴ビン材質

- カートン
 大箱・小箱 : 紙製
 チャック付ポリ袋 : ポリエチレン製
- ラベル : 紙製

- 滴ビン
 半透明本体 : ポリプロピレン製
 青色キャップ : ポリプロピレン製
 白色中栓ノズル : 高密度ポリエチレン製

カタログコードNo. 0-162

製造元 : 株式会社杉浦研究所

販売元 : 杉研商事株式会社

〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4 TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407 <http://www.sugiken.com/>