


SL クリーナー

(自然開口向け内視鏡用くもり止め)

使いやすい液体防曇剤 **SL**CLEANER FOR OPTICAL LENS

【特 性】

優れた界面活性剤の力により防曇効果が抜群です。
レンズの汚れをとる洗浄効果も兼ね備えています。
毒性がありません。LD₅₀:5000mg/Kg(マウス経口投与)
液体ですから薄く均一に塗れます。
使いやすい滴ビン入りです。

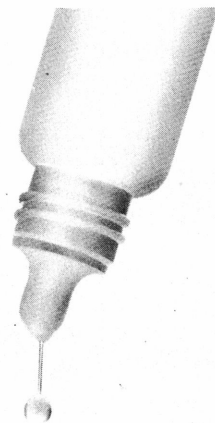

【使用法】

クリーナーをレンズ面に1滴落とし、乾燥した清浄なガーゼで拭き取って下さい。それだけで極く薄い膜を均一に塗ることが出来ます。

【成 分】

界面活性剤
n-Alkylbenzenesulfonate
Poly(oxyethylene) alkyl ether
Ethyl alcohol

(直射日光・高温・多湿を避けて保管して下さい。
未開封時2年安定)



【梱包形態】※

1カートン(大箱): 滴ビン1本(10ml入り、チャック付ポリ袋・小箱包装)
が10本入っています。

※: 梱包材質・滴ビン材質

- カートン
大箱・小箱: 紙製
チャック付ポリ袋: ポリエチレン製
- ラベル: 紙製

- 滴ビン
半透明本体: ポリプロピレン製
青色キャップ: ポリプロピレン製
白色中栓ノズル: 高密度ポリエチレン製

カタログコードNo. 0-162

製造元: 株式会社杉浦研究所

販売元: 杉研商事株式会社

〒158-0094東京都世田谷区玉川4-5-4 TEL:03-3708-3411 FAX:03-3700-4407 <http://www.sugiken.com/>