


臓器標本の撮影にご使用ください！

SL ポリカ載物トレイ&ポリカ載物プレート

ふち付きとふち無しの2つのタイプがあります！


- ★ 軽くて丈夫なポリカーボネート製です。
 - ▲ ガラス製に比べ軽く割れにくい材質です。
- ★ 臓器標本から出る液体も周囲のふちがガードします。
 - ▲ ふち付きのポリカ載物トレイは液が垂れず、周囲を汚しません。
- ★ 別売の載物シート(透明タイプまたは無反射タイプ)と組み合わせてお使いください。
 - ▲ トレイやプレートにキズや汚れが付きにくくなり掃除も簡単です。

ポリカ載物トレイ

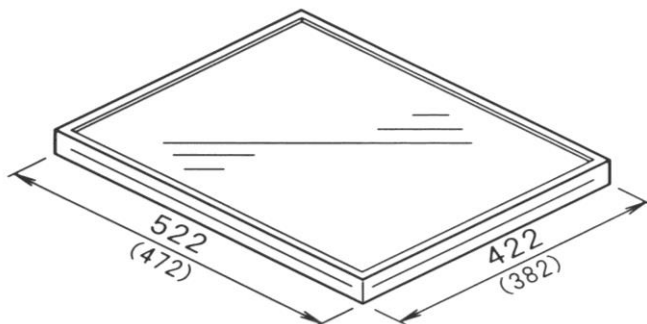

*1. 周囲に幅 10 mm の縁がついています。

ポリカ載物プレート

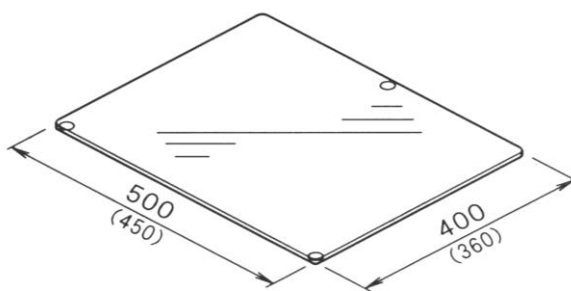

*2. 裏側 3ヶ所に足がついています。

*3. ()は小型の寸法です。

[仕様]

| | ポリカ載物トレイ | | ポリカ載物プレート | |
|-----|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | 標準 [コードNo. 8-225P] | 小型 [コードNo. 8-224P] | 標準 [コードNo. 8-235P] | 小型 [コードNo. 8-234P] |
| サイズ | (W) 522×(D) 422 ×(H) 23 mm | (W) 472×(D) 382 ×(H) 23 mm | (W) 500×(D) 400 ×(H) 5 mm | (W) 450×(D) 360 ×(H) 5 mm |
| 材質 | 透明ポリカーボネート 板厚：3 mm | | 透明ポリカーボネート 板厚：5 mm | |
| 重さ | 1.2 kg | 1.0 kg | 1.3 kg | 1.1 kg |

[取扱上のご注意]

1. ポリカーボネートは有機溶剤やアルカリ性の薬品に対し影響を受けやすく、白化やクラックを起こすことが有ります、取り扱いについては十分ご注意ください。
2. 掃除は基本水洗いですが、汚れがある場合は中性洗剤(1%~2%の水溶液)をご利用ください。また、頑固な汚れにはエタノールを柔らかい布に湿らせ軽く拭き取ってください。最後にもう一度水洗いし、水滴が残らない様に柔らかい布やスポンジ等で拭き取ってください。

* 別途、特注サイズも承ります。また、製品改良のため外観・仕様・価格などを変更することがあります。ご了承ください。

製造元：株式会社杉浦研究所

販売元：杉研商事株式会社

〒158-0094 東京都世田谷区玉川 4-5-4 TEL：03-3708-3411 FAX：03-3700-4407

<http://www.sugiken.com/>

202101